

## 1. PRODUTO

### Designação do Produto

Máscara de proteção reutilizável com elástico e 4 camadas. Nível 3.

Ref. <sup>a</sup>	Identificação EAN
HSMC023	-

### Descrição do Produto

Máscara têxtil destinada a ser utilizada pela comunidade em geral, com vista a prevenção do contágio do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).



- Máscara reutilizável (25 lavagens);
- Estilo pregueado (3 pregas);
- Com elásticos auriculares;
- Com ajuste ao nariz;
- Estrutura protetora de quatro camadas;
- Acabamento antibacteriano.


As máscaras faciais ajudam a evitar que partículas expelidas pelo utilizador (por exemplo, saliva, muco) atinjam outras pessoas ou superfícies, prevenindo o contágio do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), assim como, protegem o utilizador de partículas ou fluidos vindos de outros.

## 2. CARACTERÍSTICAS

<b>Tipologia</b>	Máscara reutilizável, 4 camadas, Nível 3		
<b>Matérias-primas</b>	2 camadas – Tecido 100% Pes 2 camadas – Não tecido 100% Pes		
<b>Instruções de Lavagem</b>	A lavagem antes da primeira utilização é facultativa. Após utilização deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem completo de, no mínimo, 30 minutos a 60 °C com detergente. Apenas podem ser utilizadas depois de bem secas. Em caso de necessidade, as máscaras podem ser estelizadas, após lavagem, à temperatura máxima de 134 °C, durante 3 minutos.		
<b>Aprovações</b>	Máscaras nível 3, de acordo com o documento “Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19”, de 14 de abril de 2020.		
	TESTES \ RESULTADOS	INICIAL	APÓS 25 LAVAGENS
	<b>Eficiência de filtração bacteriana</b>	<b>95%</b> INTERTEK (ITALIA)	<b>92%</b> EQUILIBRIUM (PORTUGAL)
	TESTES \ RESULTADOS	APÓS 25 LAVAGENS	LABORATORIO
	<b>Filtração de partículas &gt;70%</b>	<b>76%</b>	<b>CITEVE PORTUGAL</b>
	<b>Respirabilidade &gt;8l/min</b>	<b>26 l/min</b>	<b>CITEVE PORTUGAL</b>



**Medidas**

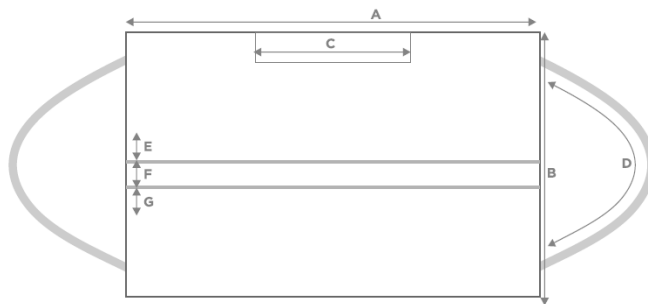

<b>A</b>	LARGURA	17CM
<b>B</b>	ALTURA	10CM
<b>C</b>	AJUSTE	8,5CM
<b>E/F/G</b>	PREGAS	1CM
<b>D</b>	ELÁSTICO	18CM

**COLOCAÇÃO DA MÁSCARA**

1. Lavar as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool (antes de colocar a máscara);
2. Colocar a máscara na posição correta. A borda dobrável deve estar para cima;
3. Segurar a máscara pelas linhas de suporte/ elásticos e adaptar a cada orelha;
4. Ajustar a máscara junto ao nariz e queixo, sem tocar na face da máscara.

**Instruções de Utilização**



**REMOÇÃO DA MÁSCARA**

1. Lavar as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool;
2. Retirar a máscara apenas segurando nas linhas de suporte/elásticos;
3. Manter a máscara longe do rosto e da roupa, para evitar tocar em superfícies potencialmente contaminadas da máscara;
4. Colocar a máscara no recipiente adequado e lavar novamente as mãos.

**3. EMBALAGEM**

Produto vendido à unidade ou em embalagens de 5 unidades.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.