

1. PRODUTO

Designação do Produto

Toalhetes desinfetantes ASEPTONET

Marca

-

Ref.^a

HSEL077G

Identificação EAN

-

Descrição do Produto

CE
0459



Pack de toalhetes de limpeza e desinfecção.

Dispositivo médico Classe IIa.

2. CARACTERÍSTICAS

Composição: Cloreto de benzalcónio, trideceth-7, ethanol, isopropanol.

Propriedades microbiológicas: em condições de sujidade (exceto *)

- Bactericida EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (incluindo SARM) em 5 min.
- Tuberculocida sobre Mycobacterium Terrae EN14348* e EN14563* em 15 min.
- Fungicida EN14562* (sobre Aspergillus Fugimatus) em 5 min.
- Levuricida EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sobre Candida albicans em 5 min.
- Vírus EN14476 sobre HBV, HCV, Adenovírus, Coronavírus, Norovírus, RSV, H1N1, HSV-1, Poliomavírus* em 1 min, Rotavírus* em 15 min.

3. CAMPOS DE APLICAÇÃO

Toalhetes para limpeza e desinfecção de superfícies, material pequeno e dispositivos médicos não-invasivos.

4. EMBALAGEM

Formto da toalhita:	180 x 200 mm
Embalagem:	100 toalhetes por embalagem
Caixa:	12 embalagens por caixa

5. PRECAUÇÕES E ARMAZENAGEM

Para mais informações, tais como identificação dos perigos, manuseamento e armazenagem, controlo da exposição/proteção individual, estabilidade e reatividade, consultar a Ficha de Segurança.

Tolerância cutânea testada sob controlo dermatológico.

6. MODO DE EMPREGO

Levantar a tampa e remover o selo de proteção. Após abertura da embalagem, retirar as toalhetes necessárias. Deixar atuar entre 1 e 15 minutos em função da eficácia antimicrobiana pretendida. Fechar corretamente a tampa após cada utilização.

Toalhetes prontas a usar de uso único. O enxagamento é inútil, exeto se o dispositivo médico pode estar em contato com as mucosas. Seca rápido e não deixa resíduo.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor. As recomendações expressas têm base experimental e científica laboratorial e servem de orientação para uma utilização correta do produto. A utilização e aplicação do produto é da responsabilidade única e exclusiva do utilizador. Em caso de dúvidas na sua aplicação consulte a CPC!

Toda a informação contida neste documento é a tradução fiel do seu original.