

## 1. PRODUTO

### Designação do Produto

Máscara de proteção com pala protetora, elástico e 6 camadas. Nível 2.

#### Ref.<sup>a</sup>

HSMC019

#### Identificação EAN

-

### Descrição do Produto

Máscara têxtil destinada a ser utilizada pela comunidade em geral, de forma preventiva.



- Máscara reutilizável (10 utilizações);
- Estilo pregueado (3 pregas);
- Com elásticos auriculares;
- Com ajuste ao nariz;
- Estrutura protetora de seis camadas;
- Acabamento antibacteriano;
- Disponível para adulto e criança;
- Disponível em várias cores.

As máscaras faciais ajudam a evitar que partículas expelidas pelo utilizador (por exemplo, saliva, muco) atinjam outras pessoas ou superfícies. Previne, assim, o contágio do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), bem como, protege o utilizador de partículas ou fluidos vindos de outros.

## 2. CARACTERÍSTICAS

<b>Tipologia</b>	Máscara Comunitária, com pala, 6 camadas, Nível 2
<b>Matérias-primas</b>	4 camadas – Tecido 100% Pes 95 g/m <sup>2</sup> 1 camada - Não tecido 100% Pes 73 g/m <sup>2</sup> 1 camada – Película 100% PU
<b>Instruções de Utilização</b>	Aconselha-se uma lavagem da máscara antes da primeira utilização. <b>Lavagem</b> Ciclo de lavagem completo de, no mínimo, 30 minutos a 60 °C com detergente. Utilizar a máscara apenas depois de bem secas. <b>Esterilização</b> (se necessário) Após lavagem, à temperatura máxima de 134 °C, durante 3 minutos <b>Colocação da máscara</b>


## Máscara de Proteção com pala protetora, elástico e 6 camadas – HSM019

Edição: 1  
DATA: 17/04/2020  
Página 2 de 3



1. Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, **antes** de colocar a máscara;
2. Colocar a máscara sobre a cara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara, na posição correta (borda dobrável para cima e parte colorida para fora);
3. Segurar a máscara pelas linhas de suporte/ elásticos e adaptar a cada orelha;
4. Ajustar a máscara junto ao nariz e no queixo, sem tocar na face da máscara.

### Retirar a máscara

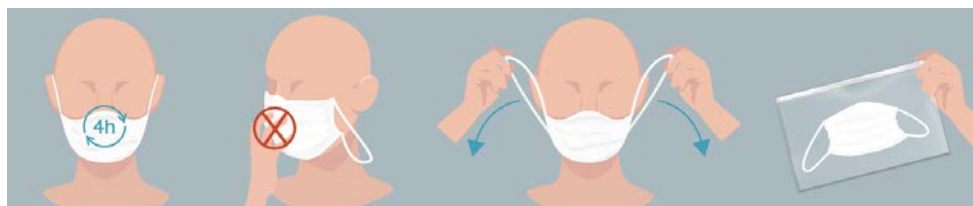

1. Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, **antes** de retirar a máscara;
2. Retirar a máscara apenas segurando as linhas de suporte/ elásticos;
3. Manter a máscara longe do rosto e da roupa, para evitar tocar em superfícies potencialmente contaminadas da máscara;
4. Colocar a máscara no recipiente adequado (individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar) e higienizar novamente as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool.


### Aprovações

TESTES	RESULTADOS	
	INICIAL	APÓS 10 LAVAGENS
<b>BFE</b> Eficiência de filtração bacteriana >90%	99,8%	94,8%
<b>Bioburden</b> Limpeza microbiana <=30cfu/g	<1	<4
<b>SPLASH RESISTANCE</b> 120 mmHg (corresponde à média da pressão arterial sistólica do sangue).	32 - testes 0 - falhas	32 - testes 0 - falhas

**Máscara de Proteção com pala protetora, elástico e 6 camadas – HSM019**

Edição: 1  
DATA: 17/04/2020  
Página 3 de 3

**Medidas**

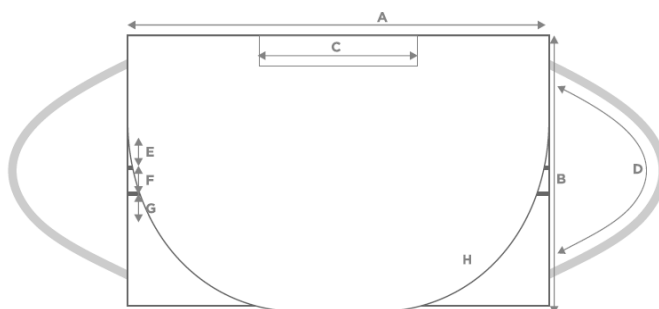

A	LARGURA	17CM
B	ALTURA	10,5CM
C	AJUSTE	8,5CM
E/F/G	PREGAS	1CM
D	ELÁSTICO	18CM
H	CAMADA PROTETORA	

**3. EMBALAGEM**

Produto vendido à unidade ou em embalagens de 10 unidades.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.