

1. PRODUTO

Designação do Produto

Máscara social reutilizável Nivel 3 (Emb. 2 unidades) Branco/Cinza

Ref.^a

HSMC020

Identificação EAN

Descrição do Produto



- Máscara lavável;
- Com elásticos auriculares;
- Com clipe nasal flexível;
- Estrutura protetora de 3 camadas;
- Acabamento antibacteriano e antiestático;
- Certificada pelo CITEVE (Relatório de ensaio n.º 4830/2020)
- Disponível em branco ou cinza.



2. CARACTERÍSTICAS

Tipologia	Máscara social, 3 camadas, Nivel 3 (adulto)
Matérias-primas	<p>Estrutura protetora com 3 camadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camada externa e interna – Malha circular 100% poliéster. Tratamento antibacteriano e antiestático. Densidade: 130 g/m² (±5%). • Camada interior – Filtro tecido não tecido (TNT) 100% Poliéster. Densidade: 51 g/m² (±5%). EN 29073.
Funcionalidade	<p>Este artigo cumpre os requisitos de desempenho padrão, de acordo com a norma aplicável a Máscaras Comunitárias.</p> <p>“Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permeabilidade ao Ar / EN ISO 9237:1995 - Caudal médio de ar = 26,0 l/min (requisito mínimo: ≥ 8 l / min) / Relatório 4160/2020 • Capacidade de Retenção de Partículas (PRC) / MI 142/00- CITEVE / - PRC = 82% (requisito mínimo: ≥ 70%) • Comportamento a Lavagem e Secagem Doméstica / Norma: ISO 6330:2012
Instruções de Lavagem	<p>As máscaras deverao ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, apos cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização. Não permite a limpeza a seco.</p> 
Duração da Vida Útil da Máscara	30 Ciclos de lavagens de acordo com as indicações recomendadas. Máscara certificada pelo CITEVE para 5 lavagens (Relatório de ensaio n.º 4830/2020).

**MÁSCARA SOCIAL
REUTILIZÁVEL NÍVEL 3 - HSMC020**

Edição: 1
DATA: 08/05/2020
Página 2 de 3


Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social fundamentais para controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.

A máscara reutilizável deveser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas de acordo com orientação da DGS (nº 019/2020 de 03/04/2020):

- a) A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso, de acordo com as recomendações de conservação e limpeza;
 - b) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
 - c) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
 - d) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
 - e) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso aconteça, deve ser feita higienização das mãos imediata;
 - f) Período máximo de utilização de cada máscara de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - g) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
 - h) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (nao tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
 - i) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
 - j) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.
- A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação.
 - A máscara dever ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação.
 - Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.
 - No final do ciclo de vida da máscara, deveser lavá-la nas condições definidas em “Instruções de Lavagem” e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não a lavar, descartar como resíduo biológico.

**Instruções de
Utilização**


Pictograma exemplificativo de colocação de máscara

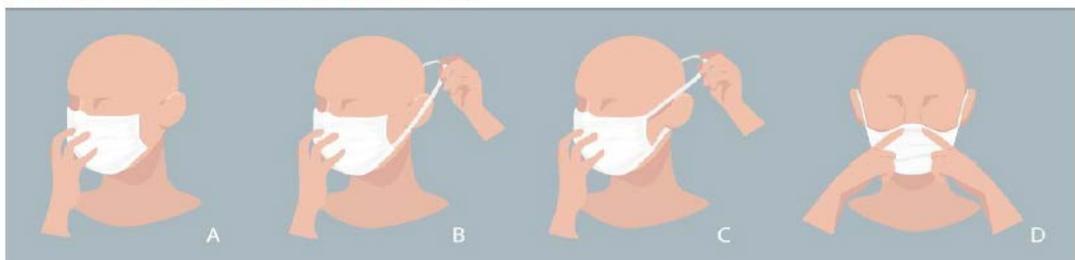

**MÁSCARA SOCIAL
REUTILIZÁVEL NÍVEL 3 - HSMC020**

Edição: 1
DATA: 08/05/2020
Página 3 de 3

Pictograma exemplificativo da retirada de máscara

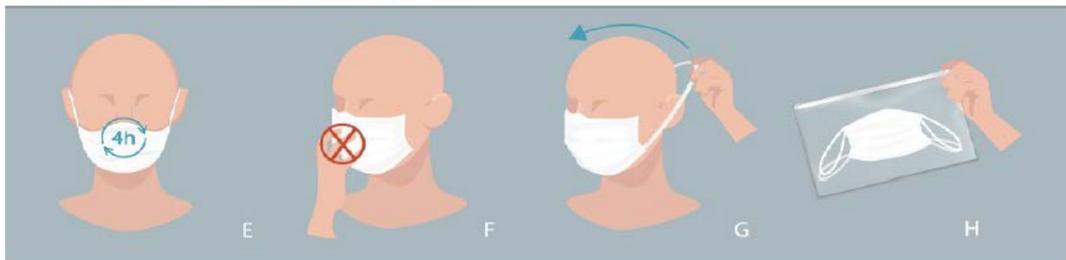

Limitações de Utilização

Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (Regulamento UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (Regulamento UE/2016/425).

A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada. A máscara molhada / húmida diminui a proteção da máscara.

A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem.

Ao fim da utilização diária recomendada ou sempre que regressar a casa a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada.

3. EMBALAGEM

Produto vendido em embalagens de 2 unidades, devidamente acondicionadas em saco selado reutilizável para guardar as máscaras quando não estão a uso. Dentro do saco encontra-se folheto explicativo com todas as normas e instruções que o produto obriga apresentar.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.