

1. PRODUTO

Designação do Produto

Máscara de proteção com viseira transparente Nível 2

Ref.^a

HSMC021

Identificação EAN

Descrição do Produto

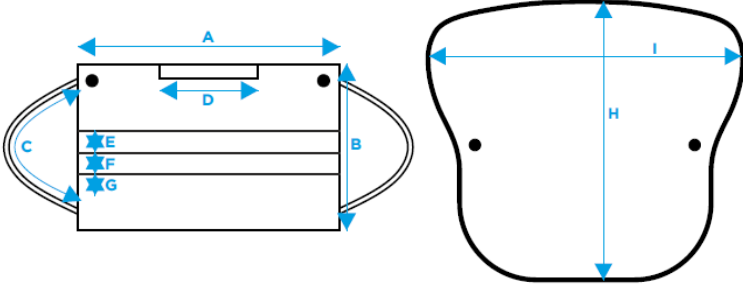

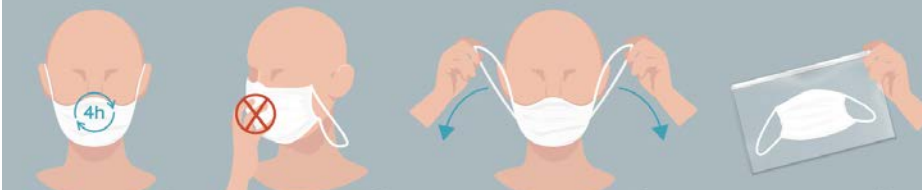


- Máscara lavável (10 utilizações);
- Com viseira amovível;
- Estilo pregueado (3 pregas);
- Com elásticos auriculares;
- Com ajuste ao nariz;
- Estrutura protetora de 3 camadas mais a viseira;
- Acabamento antibacteriano;
- Viseira reutilizável.

As máscaras faciais com viseira transparente ajudam a evitar que partículas expelidas pelo utilizador (por exemplo, saliva, muco) atinjam outras pessoas ou superfícies, prevenindo o contágio do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), assim como, protege a totalidade da cara do utilizador de partículas vindas de outros.

2. CARACTERÍSTICAS

Tipologia	Máscara comunitária com viseira, 3 camadas, Nível 2
Matérias-primas	<p><u>MÁSCARA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 folhas exteriores - Tecido 100% Pes 95 g/m² • Camada interior da máscara - Não tecido 100% Pes 73 g/m² <p><u>WISEIRA TRANSPARENTE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Composição - PETG
Instruções de Lavagem	<p><u>MÁSCARA</u></p> <p>A lavagem antes da primeira utilização é facultativa.</p> <p>Após utilização deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem completo de no mínimo de 30 minutos, a 60°C com detergente. Apenas podem ser utilizadas depois de bem secas.</p> <p>Em caso de necessidade, as máscaras podem ser esterilizadas, após lavagem, à temperatura máxima de 134°C, durante 3 minutos.</p> <p><u>WISEIRA TRANSPARENTE</u></p> <p>Limpar manualmente usando pano limpo, água e sabão.</p>
Eliminação	Quando a viseira transparente apresentar desgaste que não permita a sua utilização, deve ser colocada no ecoponto amarelo.
Riscos	Não são identificados quaisquer riscos associados a este produto.

<p>Aprovações</p>	<p>Máscara nível 2, de acordo com o documento “Máscaras destinadas à utilização no âmbito da COVID-19”, de 14 de abril de 2020.</p> <table border="1" data-bbox="427 405 1337 645"> <thead> <tr> <th>TESTES \ RESULTADOS</th> <th>INICIAL</th> <th>APÓS 10 LAVAGENS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BFE Eficiência de filtração bacteriana >90%</td> <td>99,8%</td> <td>94,8%</td> </tr> <tr> <td>Bloburden Limpeza microbiana <=30cfu/g</td> <td><1</td> <td><4</td> </tr> </tbody> </table>	TESTES \ RESULTADOS	INICIAL	APÓS 10 LAVAGENS	BFE Eficiência de filtração bacteriana >90%	99,8%	94,8%	Bloburden Limpeza microbiana <=30cfu/g	<1	<4												
TESTES \ RESULTADOS	INICIAL	APÓS 10 LAVAGENS																				
BFE Eficiência de filtração bacteriana >90%	99,8%	94,8%																				
Bloburden Limpeza microbiana <=30cfu/g	<1	<4																				
<p>Medidas</p>	 <table border="1" data-bbox="1093 719 1380 913"> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>LARGURA</td> <td>17CM</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ALTURA</td> <td>10CM</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ELASTICO</td> <td>18CM</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>AJUSTE</td> <td>8CM</td> </tr> <tr> <td>E/F/G</td> <td>PREGAS</td> <td>1CM</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>ALTURA</td> <td>22CM</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>LARGURA</td> <td>19CM</td> </tr> </tbody> </table>	A	LARGURA	17CM	B	ALTURA	10CM	C	ELASTICO	18CM	D	AJUSTE	8CM	E/F/G	PREGAS	1CM	H	ALTURA	22CM	I	LARGURA	19CM
A	LARGURA	17CM																				
B	ALTURA	10CM																				
C	ELASTICO	18CM																				
D	AJUSTE	8CM																				
E/F/G	PREGAS	1CM																				
H	ALTURA	22CM																				
I	LARGURA	19CM																				
<p>Instruções de Utilização</p>	<p style="text-align: center;">COLOCAÇÃO DA MÁSCARA</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavar as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool (antes de colocar a máscara); 2. Colocar a máscara na posição correta. A borda dobrável deve estar para cima; 3. Segurar a máscara pelas linhas de suporte/elásticos e adaptar a cada orelha; 4. Ajustar a máscara junto ao nariz e queixo, sem tocar na face da máscara. 																					
	<p style="text-align: center;">REMOÇÃO DA MÁSCARA</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavar as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool; 2. Retirar a máscara apenas segurando nas linhas de suporte/elásticos; 3. Manter a máscara longe do rosto e da roupa, para evitar tocar em superfícies potencialmente contaminadas da máscara; 4. Colocar a máscara no recipiente adequado e lavar novamente as mãos. 																					

3. EMBALAGEM

Produto vendido à unidade.

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.

A: Armazém E, Sector X (Norte), Zona Industrial da Maia I, 4475-249 Maia – PORTUGAL T: 229 952 036 F: 229 969 331 M: geral@cpc.com.pt W: cpc.com.pt